


# EXIR®

## بخور سرد الٹراسونیک

### دارای نور شب و محفظه مخصوص مواد معطر

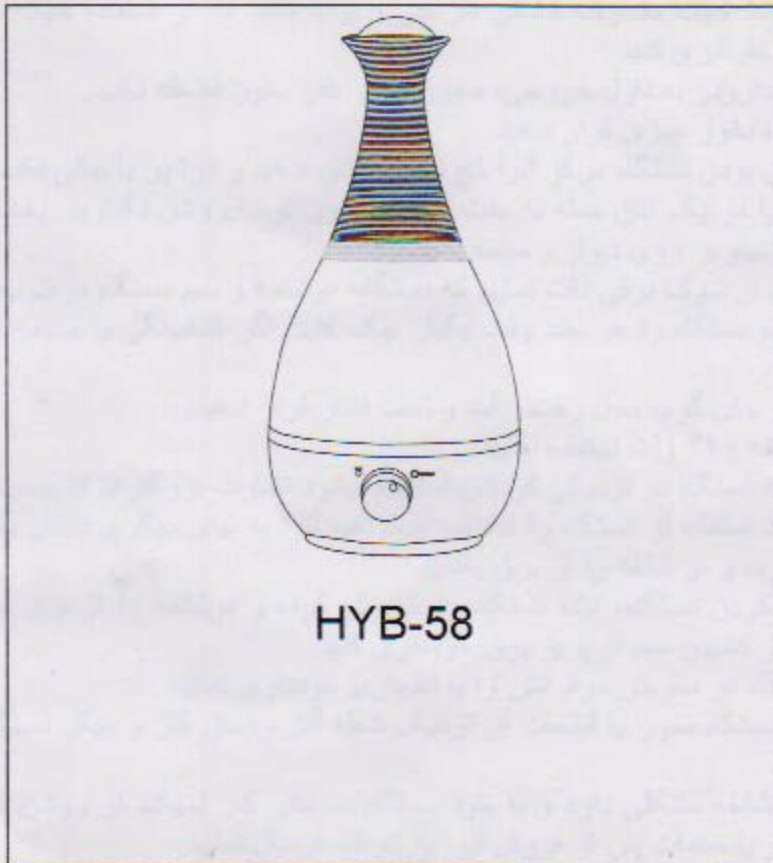

جهت افزایش عمر دستگاه بخور، استفاده از آب خالص (با املاح کم) توصیه میشود. هرگز مواد معطر و یا روغن در درون آب نریزید چون باعث خرابی دستگاه شده و آنرا از گارانتی خارج میسازد.

## قبل از استفاده از دستگاه این دستورالعمل را بدقت بخوانید.

### معرفی

از انتخاب و خرید بخور سرد EXIR سپاسگزاریم. هر دستگاه بخور سرد بر اساس اصول ایمنی و عملکرد عالی تولید شده است. قبل از استفاده برای اولین بار لطفاً این دستورالعمل فارسی را بدقت بخوانید و آنرا برای مراجعات بعدی نگه دارید.

### دستورالعمل های ایمنی مهم


در زمانی که از دستگاههای الکتریکی استفاده مینمایید، احتیاط های اولیه جهت کاهش ریسک آتش سوزی، برق گرفتگی و مصدومیت افراد باید رعایت شود که شامل موارد زیر میباشد:

- 1- دستگاه بخور را بصورتی که در این دستورالعمل آمده استفاده نمایید در غیر اینصورت باعث مواردی که در بالا ذکر شد، میگردد.
  - 2- در زمان استفاده از دستگاه، همیشه در داخل مخزن آب باشد.
  - 3- فقط از آب تمیز و خنک جهت پر کردن مخزن آب استفاده شود. اگر سختی آب شهری شما زیاد است، استفاده از آب مقطر یا آب با املاح کم استفاده میشود.
  - 4- از بسته بودن کامل درب مخزن آب مطمئن شوید.
  - 5- زمانی که مخزن آب را پر میکنید، مطمئن شوید که آب وارد قسمت خروجی بخار نشود.
  - 6- در زمان استفاده، نازل خروجی بخار را به سمت مناسب بچرخانید تا بخار به سمت دیوار، مبلمان و بچه ها خارج نشود.
  - 7- این محصول فقط جهت مصرف خانگی طراحی و تولید شده. لذا از استفاده جهت مصارف تجاری، صنعتی و خارج از خانه جلوگیری کنید.
  - 8- هیچگونه مواد دارویی به نازل خروجی، مخزن آب و کفی بخور اضافه نکنید.
  - 9- بر روی دستگاه بخور چیزی قرار ندهید.
  - 10- در زمان روشن بودن دستگاه هرگز آنرا کج نکنید، تکان ندهید و آنرا پر یا خالی نکنید.
  - 11- دستگاه بخور را در یک اتاق بسته به مدت طولانی بدون توجه روشن نگذارید. بخاطر اینکه رطوبت هوا اشباع شده و قطرات شبنم بر روی دیوار و مبلمان مینشینند.
  - 12- جهت جلوگیری از شوک برقی دقت نمایید که دستگاه، دوشاخه و سیم دستگاه مرطوب و خیس نباشد.
  - 13- دو شاخه و سیم دستگاه را هر چند وقت یکبار چک کنید. اگر شکستگی یا صدمه ای مشاهده کردید با شرکت تماس بگیرید.
  - 14- سیم برق را در جای گرم، محل رفت و آمد و تحت فشار قرار ندهید.
  - 15- از پریز دو شاخه ۲۲۰ ولت استفاده نمایید.
  - 16- در صورتی که دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده میشود نظارت بزرگترها لازم میباشد.
  - 17- زمانی که از قصد استفاده از دستگاه را ندارید، میخواهید آنرا به جای دیگری انتقال دهید و یا موقع نظافت، لطفاً آنرا خاموش کرده و دو شاخه را از برق بکشید.
  - 18- جهت خاموش کردن دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید. هرگز جهت خاموش کردن دستگاه از کشیدن سیم از پریز برق خودداری کنید.
  - 19- از استفاده دستگاه در معرض مواد آتش زا یا انفجاری خودداری نمایید.
  - 20- از قرار دادن دستگاه بخور یا قطعات آن نزدیک شعله آتش، اجاق گاز و دیگر دستگاههای گرم کننده خودداری نمایید.
  - 21- اگر سیم یا دوشاخه مشکلی دارد و یا خود دستگاه بدرستی کار نمیکند از روشن کردن آن خودداری نمایید و جهت گارانتی و یا خدمات پس از فروش آنرا به شرکت ارسال نمایید.
  - 22- از وصل کردن هرگونه اشیا یا وسایل دیگر به بخور خودداری نمایید.
  - 23- دستگاه بخور را در یک سطح صاف و محکم بدون از نور آفتاب قرار دهید.
  - 24- از روشن کردن دستگاه در صورتی که بدنه آن صدمه دیده خودداری نمایید.
  - 25- اتصال شل دو شاخه و پریز ممکن است باعث گرم شدن و خراب شدن دو شاخه گردد. با یک برق کار جهت تعویض پریز برق تماس بگیرید.
- جهت افزایش عمر دستگاه بخور، استفاده از آب خالص (با املاح کم) توصیه میشود.
- هرگز مواد معطر و یا روغن در درون آب نریزید چون باعث خرابی دستگاه شده و آنرا از گارانتی خارج میسازد.


### میزان مناسب رطوبت

- مناسبترین سطح رطوبت معادل ۳۰ تا ۵۰ درصد رطوبت نسبی میباشد.
- سطح مناسب رطوبت در هر اتاق و یا با تغییر شرایط اتاق متفاوت خواهد بود.
- در آب و هوای سرد، بر روی پنجره ها و گاهی اوقات دیوارها ممکن است بر اثر بخور زیاد داخلی قطرات بخار آب یا شبنم دیده شود. در این صورت جهت جلوگیری از اثرات تخریبی قطرات شبنم، میزان بخور را کاهش دهید.
- رطوبت بیش از حد در اتاق ممکن است سطوح مرطوب مناسب جهت تجمع و رشد باکتریها و قارچها بوجود آورد. همچنین میتواند باعث آسیب رساندن به مبلمان، دیوارها و کاغذ دیواری شود.
- جهت کاهش رطوبت اضافی، مخصوصا در اتاقهای کوچک، درب اتاق یا پنجره را باز بگذارید و میزان خروجی بخور را کاهش دهید.

### شناسایی قطعات: بدنه

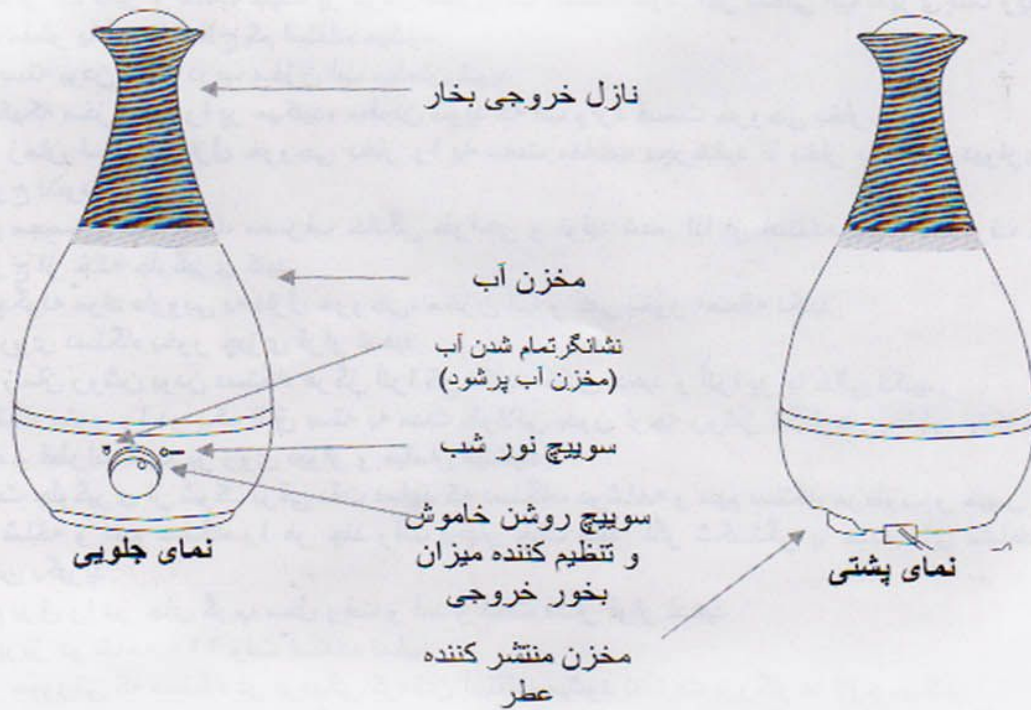


### A. قسمت کفی بخور

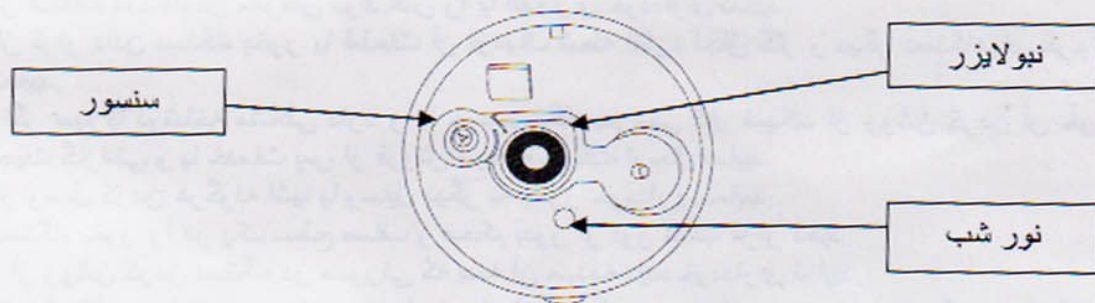

### راهنمای استفاده

- نازل خروجی بخار را بردارید.
- مخزن آب را محکم گرفته و آنرا بلند کنید.
- مخزن آب را برعکس کرده و درب آنرا در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود. با آب خنک یا آب مقطر آنرا پر نمایید. هرگز از آب گرم استفاده ننمایید. مواد معطر یا روغن به آب اضافه نکنید (باعث خرابی دستگاه میشود).
- درب مخزن تانک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود. از محکم بستن زیاد از حد بپرهیزید.
- توجه: وقتی مخزن آب را حمل میکنید، جهت تعادل و از دست رها نشدن، لطفاً یک دست خود را در زیر آن قرار دهید.
- مخزن آب را بدرستی و بدقت در جای خود قرار داده و نازل خروجی را در سر جای خود قرار دهید.
- دو شاخه را به پریز برق بزنید.
- دگمه روشن/خاموش را به سمت عقربه های ساعت بچرخانید تا دستگاه روشن شود. شما یک صدای کلیک میشنوید.
- جهت تنظیم میزان بخور خروجی، به میزان مناسب دگمه تنظیم کننده میزان بخور را بچرخانید. چرخاندن در جهت عقربه های ساعت باعث افزایش میزان بخار و در جهت خلاف عقربه های ساعت باعث کاهش میزان بخار میشود.
- دگمه نور شب را فشار دهید تا روشن یا خاموش شود.
- توجه:
- وقتی مخزن آب پر بر روی دستگاه بخور است، دستگاه را به جای دیگر منتقل نکنید. اگر میخواهید آنرا به جای دیگر منتقل کنید، دستگاه را از برق کشیده، مخزن آب و کفی را خالی کرده و سپس آنرا جا به جا کنید.
- زمانیکه دستگاه به برق است یا روشن است، مخزن آب را جدا نکنید.
- وقتی دستگاه روشن است از افزودن مواد معطر به مخزن مواد معطر خودداری نمایید.
- به میزان آب توجه نمایید. در صورت کم بودن، مخزن آب را پر نمایید.

### مخزن منتشر کننده عطر

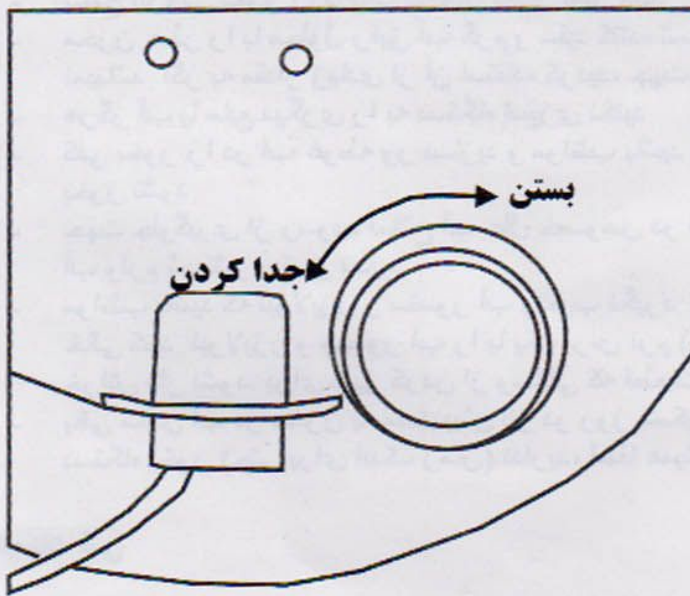

- مخزن عطر را از زیر دستگاه جدا نمایید.
- درب مخزن عطر را بردارید.
- مواد معطر یا مواد روغنی پزشکی را بدقت به آن بیفزایید. استفاده از قطره چکان توصیه میگردد.
- درب مخزن عطر را بدقت در سر جای محکم کنید.
- مخزن عطر را در سر جای خود بدقت قرار دهید.
- توجه: قبل از درآوردن مخزن عطر ابتدا مخزن آب را برداشته و همچنین آب داخل کفی بخور را خالی کنید.

### نگهداری در زمانی که از بخور استفاده نمیشود:

- کارتن بخور را برای مواقعی که از بخور استفاده نمیکنید نگهدارید.
- مخزن آب، کفی بخور، مخزن عطر و بقیه قطعات را تمیز کرده و خشک نمایید.
- اگر آب درون بخور باقی بماند در زمانی که از آن استفاده نمیکنید، رسوب کرده و باعث میشود که دستگاه در آینده بخوبی کار نکند.
- درب مخزن آب را محکم ببندید زیرا از به هم چسبیدن درب و مخزن آب جلوگیری کرده و باعث افزایش عمر درب و مخزن آب میشود.

### عیب یابی

دستگاه بخور تولید نمیکند.

- چک کنید که دستگاه روشن باشد.
- سویچ روشن/خاموش را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا میزان بخور افزایش یابد.
- چک کنید که آب در داخل مخزن آب باشد.
- اگر آب داخل مخزن آب وجود داشته باشد، ممکن است میزان آب در کفی بخور زیاد باشد. دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید. سپس آب درون کفی را خالی کنید.
- چک کنید که مخزن آب بدرستی در سر جای خود قرار گرفته باشد.

### مراقبت و نگهداری

- قبل از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کرده و آنرا از برق بکشید.
- از هرگونه مواد شوینده یا مواد شیمیایی برای پاک کردن مخزن آب و کفی بخور هرگز استفاده نکنید. مواد شوینده محلول در آب میتواند با بخور خروجی تداخل پیدا کند.
- اگر مخزن آب بسیار کثیف میباشد، با محلول بسیار رقیق آب و مایع سفید کننده آنرا شستشو داده و تمیز نمایید. از مواد شوینده و شیمیایی هرگز استفاده نکنید.
- سطح بیرونی بخور را با یک دستمال تمیز کنید.
- مخزن عطر را با محلول رقیق آب گرم و سفید کننده شستشوداده و تمیز نمایید. درب مخزن عطر قابل تمیز کردن نمیباشد. اگر به مقدار زیادی از آن استفاده کردید، جهت تعویض آنن با شرکت تماس بگیرید.
- هرگز آب یا مایع دیگری را به دستگاه اسپری نکنید.
- کفی بخور را در آب غوطه ور نسازید و مواظب باشید که آب از قسمت زیرین کفی یا جاهای دیگر وارد دستگاه بخور نشود.
- جهت جلوگیری از رسوب املاح آب علل خصوص در فصول گرم، مخزن آب و نازل خروجی بخار را مرتباً با آب ولرم شستشو و تمیز نمایید.
- مواظب باشید که نبولایزر و سنسور آب رسوب نگیرد. به این منظور مخزن آب را برداشته و آب قسمت کفی را خالی کنید. نبولایزر و سنسور آب را با یک برس نرم (مسواک کهنه) تمیز کنید و مواظب باشید که سطح آنها خراش دار نشود. برای تمیز کردن از وسایلی که قطعات فلزی دارند استفاده نکنید.
- باقی ماندن آب در مخزن به مدت بیش از دو روز ممکن است باعث رشد باکتریها شود. اگر قصد استفاده از دستگاه بخور (حتی برای اندک زمان) ندارید، لطفاً همیشه آب آنرا خالی کنید.

### مشخصات فنی

HYB-58	مدل
AC 220-240V~50Hz	ولتاژ ورودی
25W	میزان مصرف برق
3 L	ظرفیت مخزن آب