


بخش کننده صابون و مواد ضد عفونی کننده (Dispenser)

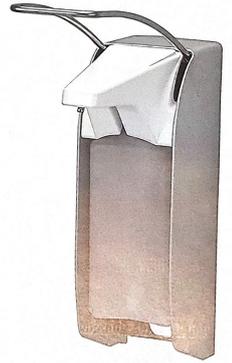


IMP E/PK
S1P119612



ingo-man®
Technical Service





دستگاه بخش کننده صابون و مواد ضد عفونی کننده (Dispenser)

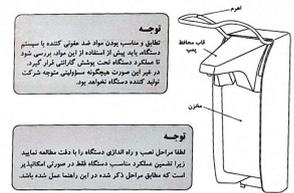

توجه: تقابل و مناسب بودن مواد ضد عفونی کننده با سیستم دستگاره باید با دقت از استاندارد این مواد بررسی شود تا مشکلی در دستگاه منجر نشود. همچنین برای استفاده از این مواد در این دستگاه، در هر این صورت چکبکچه سوراخ شده شرکت تولید کننده دستگاه نظاره شود.

توجه: لطفاً مراحل نصب و راه اندازی دستگاه را با دقت مطالعه نمایید زیرا تعیین عملکرد مناسب دستگاه فقط در صورتی امکانپذیر است که مطابق مراحل ذکر شده در این راهنما عمل شده باشد.

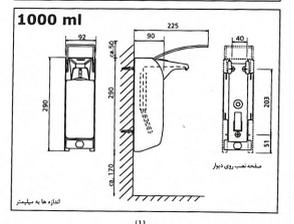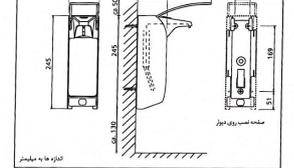

۱- آماده سازی محل نصب

دستگاه را در محدوده سبک نصب نمایید تا از چکبک مایهات روی زمین جلوگیری شود.
✓ فضای مورد نیاز در بالای دستگاه: حدود ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر برای دستگیره اهرم و کشیدن و برداشتن دستگاه به اندازه ۱۰۰ سانتیمتر برای کارگر اهرم.
✓ فضای مورد نیاز در پایین دستگاه: برای دستگاه ۵۰۰ میلی لیتری: ۱۲۰ سانتیمتر و برای دستگاه ۱۰۰۰ میلی لیتری: ۱۷۰ سانتیمتر به منظور برداشتن مخزن مایع.
✓ ارتفاع مناسب محل نصب دستگاه: قلمه ۱۲۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر از کف تا روی بدنه دستگاه مناسب است.

۲- نصب دستگاه
✓ ابتدا مخزن مایع را خارج نمایید. برای این کار پایین مخزن را به سمت بیرون بکشید سپس آنرا بیرون آورید.
✓ دستگاه را با مخزن شستن موجود بر روی صفحه نصب و از کشیدن دستگاه به طرف بالا از صفحه نصب جدا کنید.
✓ با روش مناسب (مانند پیچ و مهره یا گچ) صفحه نصب را بر روی دیوار نصب نمایید.
✓ سپس دستگاه را از بالا به پایین بر روی صفحه نصب بگذارید تا شستن آن در فشار دستگاه قرار گیرد. (تصویر شماره ۲)

۳- درپوش انتصاب پذیر درزبندی
 این درپوش با فرم کردن بهترین درزبندی برای انواع مخزن ها از تخییر و به هر رخنه اکل موجود در مواد ضد عفونی کننده جلوگیری می کند.


۴- نصب یا تعویض مخزن
 مخزن پر شده را از پایین و با حرکت به سمت بالا بیرون دستگاه قرار دهید تا در محل درست قرار گیرد.

۵- راه اندازی دستگاه

برای راه اندازی دست خود را زیر تابلو نگاه دارید و دست اهرم را چند مرتبه به پایین فشار داده و آماده کنید تا مایع از دستگاه خارج شود.

۶- تنظیم فشار خروج مایع (در صورت وجود)
 به صورت پیش فرض، در هر بار فشرده شدن اهرم بیشترین مقدار مایع (۱۵۰ میلی لیتر) از دستگاه خارج می شود. اما برای تغییر این مقدار باید ابتدا سپر از دستگاه خارج شود.
توجه ۱: هیچگاه بخش مایع سپر را از جای خود خارج نکنید. همچنین مقدار مایع خروجی فقط برای محلول های مناسب با طراحی دستگاه مانند صابون مایع ضد عفونی کننده و خوشبو کننده قابل تنظیم است و استفاده از سایر مواد مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن آن در چشم شود.

۷- خارج کردن سپر
 درپوش فوقانی را به آرامی ابتدا به سمت چپ و سپس به طرف بالا بکشید. هنگام فشار دادن فیلتر کننده سپر را با انگشت به پایین فشار دهید و سپس آن را به سمت چپ خارج کنید.
 (تصویر شماره ۱-۷ تا ۳-۷)

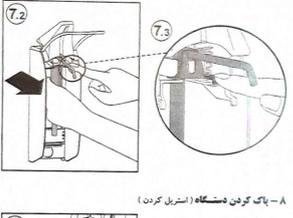

۸- پاک کردن دستگاه (استریل کردن)
 دستگاه را از صفحه نصب جدا نمایید. مابین سطوح پس از خارج کردن مخزن، زمانه فیلتر کننده واقع در دیواره سمت دستگاه را فشار داده و دستگاه را به بالا حرکت دهید.
 توجه فرمایید که اگر بدنه دستگاه و سپر روئیده خروبی آن از استریل ساخته شده اند می توان آنها را با بخار داغ اتوکلاو نمود.
 شرایط اتوکلاو بخشهای فلزی: حداکثر تا دمای ۱۲۲ و فشار ۲ بار به مدت ۲۰ دقیقه.

توجه ۲: بخش های پلاستیکی دستگاه هم از صفحه نصب روی دیوار، مخزن و سپر پلاستیکی قابل فرار کردن در اتوکلاو نیستند. برای آگاهی از ویژگی های خارج کردن سپر، تصویر شماره ۲ را مشاهده کنید.
 حداکثر تا دمای ۱۲۲ و فشار ۲ بار به مدت ۲۰ دقیقه.

۹- اطلاعات عمومی
 بر اساس توضیح مؤسسه «ارث کج» در این گونه دستگاه ها باید در هر بار بر کردن مخزن، تمیز و ضد عفونی شوند از طرف دیگر، فیلتر دستگاه و محلول های دارای کثرت ممکن است باعث ایجاد خورگی و مخزن شدن میگردد. بخش های استریل دستگاه خود این امکان حتی ممکن است با مگر برن فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا نیز در مکان هایی که در هوای آنها نمک و کثرت وجود دارد (مانند سونا و استخر شنا) به وجود آید.
 برای تعیین عملکرد مناسب دستگاه لازم است بدنه و سپر آن با آب داغ و محلول شوینده با PH خنثی شسته شوند. حداکثر فشار آب برای شستوی سپر پلاستیکی باید ۳۵۰ سانتیگراد باشد.